



Share2Go

Instructiekaart Scootmobiel Pride Luna Victory Z2



Op deze instructiekaart vindt u de uitleg voor een aantal handelingen die u zelf uit kunt voeren. De onderstaande afbeelding helpt u met het vinden van de positie van verschillende hendels en andere handige onderdelen van de scootmobiel. De letter bij de hendel komt overeen met de letter van de stap waarbij het onderdeel hoort.



A. Plaatsnemen op de scootmobiel

1. Zet de armleuning rechtop.
2. Beweeg de hendel aan de rechterzijde van de stoel omlaag.
3. Draai de stoel opzij.
4. Neem plaats op de stoel en draai de stoel op dezelfde manier weer recht.

Aanpassen van de zithouding

B. Het aanpassen van de zithoogte (hoe ver u van het stuur af zit)

1. Om de zitdiepte te veranderen bedient u de hendel aan de linkerzijde van de stoel.
2. Schuif de stoel naar voren of naar achteren.
3. Laat de hendel los. De stoel staat nu weer vast.

C. Het aanpassen van de hoek van de rugleuning

1. Beweeg de hendel aan de rechterzijde van de stoel op de hoek waar de rugleuning en de zitting samenkomen omhoog.
2. Om meer naar achteren te leunen duwt u met uw rug voorzichtig tegen de rugleuning. Om de Leuning meer rechtop te zetten leunt u helemaal niet tegen de rugleuning.
3. Laat de hendel los als de leuning in de juiste positie staat.

D. Het aanpassen van de hoek van de stuurkolom

1. Beweeg de hendel die zich aan de bestuurderszijde van de stuurkolom bevindt omhoog.
2. Zet de stuurkolom in een voor u prettige positie.
3. Laat de besturingshendel los.

Heeft u een vraag?

Bel **085 487 5668** of kijk op **www.share2go.nl**



E. Opladen van accu's

Aan de bestuurskant van de stuurkolom zit het acculaadcontact. Steek de ene kant van de lader in de acculaadcontact en de andere kant van de lader in het stopcontact. Het duurt 8 tot 14 uur om de scootmobiel volledig op te laden. Sluit bij terugkomst na een rit altijd de oplader aan.

F. Vrijloopmechanisme

1. Op de rechterachterkant van de scootmobiel vindt u een schuifje waarmee u de scootmobiel in de vrijloopstand kan zetten. Zet dit schuifje om.
2. U kunt de scootmobiel nu handmatig verplaatsen. Vergeet het schuifje niet om te zetten wanneer u weer op de scootmobiel wilt rijden. Anders zal de scootmobiel niet inschakelen.

Let op: zorg ervoor dat de scootmobiel nóóit op een helling of drempel staat wanneer u de vrijloopstand gebruikt. Deze kan dan door de zwaartekracht gaan rollen. Gebruik deze functie alleen voor het duwen van een persoon op een scootmobiel bij pech of storing, het manoeuvreren van de scootmobiel in krappe ruimtes of het verplaatsen van de scootmobiel wanneer de accu leeg is.

Oplossen van problemen

Reageert de scootmobiel helemaal nergens op?

Dan kunt u het volgende proberen:

- Controleer of de scootmobiel aan staat.
- Controleer of de accu's zijn opgeladen.
- Controleer of de scootmobiel niet in de vrijloopstand staat.

Werken bovenstaande oplossingen niet?

Werken bovenstaande oplossingen niet en/of staat er een foutmelding in het scherm? Bel dan naar **085 487 5668**. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar bij calamiteiten. U vindt dit nummer ook op de servicesticker van de scootmobiel, maar het is verstandig om dit nummer ook op te slaan in uw telefoon. Het kan zijn dat er gevraagd wordt naar het WZ-nummer van de scootmobiel. Deze vindt u op een witte sticker onderaan de achterzijde van de scootmobiel.



Heeft u een vraag?
Bel 085 487 5668 of kijk op www.share2go.nl